



Prüfung der RDG für MIC-Instrumente und Anästhesiezubehör Arbeitsanleitung zur Handhabung der Reinigungs- und Bioindikatoren

Diese Arbeitsanleitung zur Handhabung der Indikatoren bei Probenahme, Lagerung und Transport dient der Qualitätssicherung im Rahmen der Prüftätigkeit des Labors *biocheck*.

Produkt: RE-EVA-2 (Reinigungsindikator)
BI-EVA-2 (Bioindikator)

Hinweis: Es sollte jedes Programm getestet werden.
Grundsätzlich sollten die Bioindikatoren vor und nach der Prüfung bis zum Versand bei 4 – 8 °C gelagert werden.

Versand: Die Indikatoren spätestens am Mittwoch zum Versand bringen, damit diese nicht über das Wochenende unterwegs sind.

Anzahl der Indikatoren und Häufigkeit der Prüfung:

Es wird die Verwendung von jeweils 5 Reinigungs- und 5 Bioindikatoren empfohlen. Bei Bioindikatoren ist zusätzlich eine Transportkontrolle mitzuführen, die nicht der Testung beigelegt wird. Die Prüfung der Reinigungsleistung und der desinfizierenden Leistung wird ¼-jährlich empfohlen.

Vorgehensweise

- Die Indikatoren mit Einmalhandschuhen in die Adapter des "RDG-CHECK" des Labors *biocheck* einlegen. Den RDG-Check mit den entsprechenden Adaptern an die Anschlüsse für MIC-Instrumente, Luer-Lock-Anschlüsse oder Schlauchanschlüsse anschließen.
Die Transportkontrolle (Bioindikator) nicht dem Spülprozess aussetzen.
- Bei der Prüfung sollten, soweit möglich, die verschiedenartigen Anschlüsse unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Druckverhältnisse geprüft werden.
- Die Kunststoffröhrchen, in denen sich die Edelstahlplättchen befanden, zum normalen Abfall geben.
- Die Spülmaschine wie üblich beladen und einschalten.
- Programmende:
Nach abgeschlossenem Spülprogramm die Edelstahlplättchen mit sterilen oder in dem geprüften Gerät gespülten Pinzetten oder sterilen Einmalhandschuhen in die mitgelieferten sterilen Röhrchen überführen. Pro Röhrchen nur 1 Indikator einfüllen!
- Die Röhrchen nummerieren und sowohl die Nummerierung als auch die Platzierung der Indikatoren im Gerät im Untersuchungsauftrag im Bereich Probenahme vollständig eintragen und unterzeichnen.
- Die Indikatoren getrennt nach Programmen in eine Tüte verpacken und mit den Untersuchungsaufträgen sowie den Transportkontrollen an das Labor *biocheck* zur Auswertung übersenden.

Probenahme und Transport sind nicht Teil der Akkreditierung des Labors.
Ausgabe: 11/2019